

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ГЛЮТАР»

Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Глютар» предназначена для медицинского персонала организаций здравоохранения и санитарно-эпидемиологических организаций, работников центров дезинфекции и стерилизации, а также других учреждений, занимающихся дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Средство дезинфицирующее «Глютар» (ТУ ВУ 811000252.007-2007, РЦ РБ 811000252.006-2007) является высокоэффективным универсальным препаратом для дезинфекции и предстерилизационной обработки (в том числе совмещенных в одном этапе) изделий медицинского назначения, оборудования и дезинфекции поверхностей, стерилизации термостабильных (металл, стекло, керамика, и др.) и термолабильных (в том числе эндоскопы и инструменты к ним) изделий медицинского назначения.

1.2. Средство «Глютар» представляет собой концентрированный прозрачный раствор синего цвета с легким ароматическим запахом. Содержит в своем составе глutarового альдегида 4%, дидецилдиметиламмония хлорида 10%, глуксаля 3%, а также неактивные компоненты: комплексоны-синергисты, ингибитор коррозии и другие специальные добавки. Выпускается в полиэтиленовой таре номинальным объемом 0,5 л, 1,0 л и 5,0 л.

Срок годности концентрата составляет 2 года, рабочих растворов – 15 дней.

1.3. «Глютар» обладает широким спектром антимикробного действия и эффективен в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая возбудителей гепатитов, СПИДа, полиовирусов, вирус герпеса, гриппа, в том числе и гриппа H1N1), патогенных грибов и дерматофитов.

1.4. Средство дезинфицирующее «Глютар» предназначено для:

- дезинфекции, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии;

- дезинфекции жестких и гибких эндоскопов, и инструментов к ним при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии;

- предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (в том числе хирургических и стоматологических инструментов, эндоскопов и инструментов к ним);

- стерилизации термостабильных (металл, стекло, керамика, и др.) и термолабильных (в том числе эндоскопы и инструменты к ним) изделий медицинского назначения;

- дезинфекции медицинских отходов, включая перевязочные средства (ватно-марлевые повязки, тампоны и т.п.), белье и изделия медицинского назначения однократного применения);

- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, санитарного технического оборудования, посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, резиновых ковров, обуви при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в организациях здравоохранения всех типов, инфекционных очагах, детских (кроме помещений с временным и постоянным пребыванием детей), пенитенциарных, коммунально-бытовых (парикмахерских, салонов красоты, бань, саун, бассейнов, прачечных, санпропускников и т.д.), спортивных, административных и др. учреждениях, предприятиях парфюмерно-косметической, пищевой

промышленности и общественного питания, промышленных рынках и населением в быту;

- для проведения генеральных уборок;
- дезинфекции объектов транспорта, включая салоны санитарного транспорта,
- для дезинфекции жидких выделений: мочи, фекалий, крови, сыворотки и других биологических жидкостей при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая энтеровирусные инфекции, парентеральные вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекцию) и грибковой этиологии в организациях здравоохранения, бактериологических и клинических лабораториях, станциях переливания крови, машинах скорой медицинской помощи и др.

1.5. Средство дезинфицирующее «Глютар» не вызывает коррозию металлов, обладает выраженной моющей способностью. Средство хорошо смешивается с водой. Растворы не портят обрабатываемые поверхности, не обесцвечивают ткани. Средство не совместимо с мылами, анионными поверхностно-активными веществами и синтетическими моющими средствами.

1.6. Рабочие концентрации по ГОСТ 12.1.007-76 относятся к IV классу малоопасных соединений. Концентрат средства «Глютар» по параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к III классу умеренно опасных веществ, обладает кожно-раздражающим и кожно-резорбтивным эффектом, обладает слабым сенсibiliзирующим действием. В рабочих концентрациях не оказывает местного раздражающего действия на кожу, при попадании на слизистые оболочки вызывает раздражение.

1.7. Водородный показатель pH концентрата составляет 2,5 – 4,2 ед., pH 1 % рабочего раствора составляет 7,2 - 7,8 ед.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. При приготовлении и хранении рабочих растворов средства «Глютар» должны использоваться стеклянные, эмалированные (без повреждения эмали) или полиэтиленовые емкости с крышками. Рабочие растворы приготавливаются путем смешивания концентрата с водопроводной водой (препарат вливают в воду) (см. таблицу 1). Помещение, в котором готовят раствор, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

Таблица 1 Приготовление рабочих растворов средства «Глютар»

Концентрация раствора %			Количество концентрата и воды (мл), необходимые для приготовления					
по препа- рату	по глютаровому альдегиду	по глиоксалу	1 л рабочего раствора		10 л рабочего раствора		100 л рабочего раствора	
			Концентрат	вода	концентрат	вода	концентрат	вода
0,1	0,004	0,003	1,0	999,0	10,0	9990,0	100,0	99 900,0
0,25	0,01	0,0075	2,5	997,5	25,0	9975,0	250,0	99 750,0
0,5	0,02	0,015	5,0	995,0	50,0	9950,0	500,0	99 500,0
1,0	0,04	0,03	10,0	990,0	100,0	9900,0	1000,0	99 000,0
2,0	0,08	0,06	20,0	980,0	200,0	9800,0	2000,0	98 000,0
3,0	0,12	0,1	30,0	970,0	300,0	9700,0	3000,0	97 000,0
4,0	0,16	0,12	40,0	960,0	400,0	9600,0	4000,0	96 000,0
10,0	0,4	0,3	100,0	900,0	1000,0	9000,0	10000,0	90 000,0

2.2. Для приготовления рабочих растворов других концентраций или объемов проводят перерасчет.

2.3. Рабочие растворы препарата (0,1 - 4%) практически бесцветны, в норме – прозрачны с ароматическим запахом.

2.4. На емкостях с рабочими растворами средства необходимо указывать название препарата, концентрацию раствора и дату приготовления.

2.5. Рабочие растворы пригодны к использованию в течение 15-ти суток при условии хранения в непрозрачных закрытых емкостях при комнатной температуре.

2.6. При многократном использовании рабочих растворов периодически должен проводиться визуальный контроль их пригодности, просмотром пробы, отобранной после тщательно перемешанного рабочего раствора, в количестве не менее 20-30 мл в стакане В-1 (2)-50 по ГОСТ 25336 на фоне листа белой бумага в проходящем или отраженном свете или свете электрической лампы.

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «ГЛЮТАР»

3.1. Для дезинфекции изделий медицинского назначения:

3.1.1. Рабочие растворы средства применяют для дезинфекции (в том числе совмещенной с ПСО) изделий медицинского назначения из различных материалов: резин, стекла, металлов, керамики, пластмасс (включая хирургические, стоматологические инструменты).

3.1.2. Рабочие растворы средства используют для дезинфекции (в т.ч. совмещенной с ПСО) многократно в течение 15 суток при условии сохранения оптической прозрачности рабочего раствора (п. 2.6). Температура рабочих растворов, применяемых для дезинфекции (в том числе совмещенной с ПСО) должна быть в пределах от 15°C до 40°C.

3.1.3. Дезинфекцию изделий медицинского назначения проводят способом погружения в дезинфицирующий раствор, заполняя каналы и полости изделий, избегая образования воздушных пробок. Сложные изделия дезинфицируют в разобранном виде. Дезинфицирующий раствор должен покрывать изделия не менее, чем на 1 см. Режимы дезинфекции представлены в таблице 2.

3.1.4. Дезинфекция изделий медицинского назначения, совмещенная с ПСО, должна включать следующие этапы:

- а) замачивание изделий в емкости №1 с раствором средства «Глютар»;
- б) замачивание изделий в емкости № 2 с раствором средства «Глютар», режимы указаны в таблице 2;
- в) мойка каждого изделия в том же растворе в течение 0,5-1,0 мин;
- г) ополаскивание проточной водой в течение 3-5 мин.;
- д) ополаскивание дистиллированной водой в течение 0,5 мин.;
- е) сушка до полного высыхания.

На этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы) этиологии.

3.1.5 Мойка каждого изделия проводится в том же растворе, в котором выполнено замачивание, при помощи ерша или щетки. Изделия из резин и пластмасс обрабатывают ватно-марлевым тампоном или салфеткой. Каналы изделий промывают с помощью шприца.

При сильном визуальном загрязнении изделий, предназначенных для дезинфекции и ПСО, проводят предварительную очистку в первой емкости.

Оптически прозрачный раствор препарата во второй емкости можно использовать многократно в течение 15 суток до появления хлопьев, осадка или помутнения (п. 2.6).

3.1.6. Дезинфекцию (совмещенную с ПСО) стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, артикуляторов, отсасывающих систем, плевательниц – осуществляют в соответствии с режимами, изложенными в таблице 2.

Таблица 2 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «Глютар» при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии.

Объект дезинфекции	Концентрация раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.		Способ дезинфекции
		Вирусные, грибковые, бактериальные (кроме туберкулеза) инфекции	туберкулез	
Изделия медицинского назначения, в том числе хирургические и стоматологические инструменты	0,5	60	90	Погружение
	1	-	45	
	4	10	15	
Эндоскопы	0,5	60	90	Погружение
	4,0	10	15	

3.2 Применение средства для предстерилизационной очистки (ПСО).

3.2.1 Рабочие растворы средства в концентрации 0,5-1% применяют для ПСО изделий медицинского назначения из различных материалов, в том числе хирургических и стоматологических инструментов. ПСО изделий проводят после их дезинфекции. Рабочие растворы для ПСО могут использоваться многократно в течение одной смены до появления хлопьев, осадка или помутнения. При этом изделия необходимо предварительно очистить от биологических загрязнений в растворе, где проведена дезинфекция.

3.2.2 ПСО ручным способом производится в соответствии с этапами, предусмотренными приказом МЗ РБ "О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения" от 25. 11. 2002 г № 165, указанными в таблице 3.

Таблица 3 Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения средством «Глютар»

Этапы обработки	Концентрация раствора (по препарату), %	Экспозиция, мин
Замачивание изделий в растворе	0,5	60
	1	30
	4	10
Мойка изделий в растворе - изделий с простой конфигурацией - изделий имеющих каналы или полости	Концентрация раствора используемого для замачивания	0,5- 1 1
Ополаскивание проточной водой	-	3
Ополаскивание дистиллированной водой	-	0,5 – 1
Сушка	-	До полного высыхания

Мойка каждого изделия проводится в том же растворе, в котором выполнено замачивание, при помощи ерша или щетки. Изделия из резин и пластмасс обрабатывают ватно-марлевым тампоном или салфеткой. Каналы изделий промывают с помощью шприца.

3.3. Применение средства для ПСО, дезинфекции эндоскопов и инструментов к ним.

3.3.1. Предстерилизационную очистку, а также дезинфекцию эндоскопов и медицинских

инструментов к гибким эндоскопам проводят с учетом требований, изложенных в приказе МЗ РБ № 167 от 23.10.03 «Об утверждении инструкции по профилактике инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» по режимам, указанным в табл. 4.

Таблица 4. Режимы предстерилизационной очистки гибких, жестких эндоскопов и инструментов к ним растворами средства «Глютар»

Этапы при проведении очистки	Температура рабочего р-ра, °С	Концентрация рабочего р-ра (по препарату), % ПСО	Время выдержки/обработки, мин
1. Замачивание эндоскопов или инструментов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия с помощью шприца	Не менее 18	0,5 1,0 4,0	60 30 10
2. Мойка каждого эндоскопа или инструментов в том же растворе, в котором проводили замачивание: - инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки	Не менее 18	В соответствии с концентрацией использованного на этапе замачивания раствора	2,0 3,0 1,0
3. Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца)	Не нормируется		3,0
4. Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца)	Не нормируется		1,0

3.4. Применение средства для стерилизации.

3.4.1 Рабочие растворы средства применяются для стерилизации термостабильных (металл, стекло, керамика, и др.) и термолабильных (в том числе эндоскопы и инструменты к ним) изделий медицинского назначения (далее ИМН) способом погружения по режимам, указанным в таблице 5.

Таблица 5 Режимы стерилизации термостабильных (металл, стекло, керамика, и др.) и термолабильных (в том числе эндоскопы и инструменты к ним) изделий медицинского назначения растворами средства «Глютар»

Режим стерилизации	Концентрация рабочего раствора, %	Экспозиция, мин
Замачивание в рабочем растворе при температуре 50°С	10,0	60

3.4.2 Стерилизацию ИМН проводят в эмалированных или других коррозионно-стойких емкостях с крышками, а также специальных ванночках при полном погружении ИМН в рабочий раствор средства и заполнении им всех каналов. Толщина рабочего раствора средства «Глютар» над ИМН должна быть не менее 1 см.

3.4.3 Стерилизации подвергают изделия, прошедшие предварительную дезинфекцию и предстерилизационную очистку. Во избежание разбавления рабочего раствора ДС погружать в раствор следует только сухие изделия. При стерилизации сложных по конструкции изделий медицинского назначения (эндоскопы и инструменты к ним) используют технологию обработки, указанную в инструктивно-методических документах на эти изделия.

3.4.4 Проведение стерилизации должно проводиться в асептических условиях.

3.4.5 После окончания времени стерилизации изделия извлекают из раствора, удаляют средство из каналов и переносят в простерилизованную емкость со стерильной водой для отмывания от остатков средства. Отмыв металлических предметов осуществляется в течение 5 минут, остальных изделий – в течение 15 минут. Каналы промывают с помощью шприца или водоструйного насоса в течение 3-5 минут.

3.4.6 Отмытые от остатков средства стерильные ИМН извлекают из воды, помещают в стерильную простыню. Удаляют с помощью стерильного шприца, остатки воды в каналах и помещают изделия в стерильные емкости (биксы или специальные контейнеры), выложенные стерильной простыней. Стерильные изделия хранят не более 3-х суток.

3.4.7 Стерилизацию эндоскопов ДС следует проводить согласно с требованиями действующих нормативно-правовых актов в соответствии с режимами, указанными в табл.5.

3.5. Применение средства для дезинфекции поверхностей.

3.5.1. Дезинфекцию осуществляют способом протирания, орошения, замачивания и погружения. Режимы дезинфекции объектов при различных инфекциях растворами средства приведены в таблице 6.

Таблица 6. Режимы дезинфекции поверхностей растворами средства «Глютар»

Объект обеззараживания		Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин				Способ обеззараживания
			Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза)	кандидоз	Вирусные инфекции	Туберкулез, дерматофитии	
Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткая мебель, поверхности аппаратов, приборов		0,1	60	-	-	-	Однократное протирание, орошение
		0,25	-	-	60	-	
		0,5	15	60	30	90	
		1,0	10	10	30	45	
		4,0	10	10	10	15	
Санитарно-техническое оборудование		0,1	60	-	-	-	Однократное протирание, орошение
		0,25	-	-	60	-	
		0,5	15	30	30	90	
		1,0	10	10	30	45	
		4,0	10	10	10	15	
Предметы ухода за больными		0,5	60	60	60	90	погружение
		1,0	-	-	30	45	
посуда	без остатков пищи	0,25	-	-	60	-	погружение
		0,5	15	60	30	90	
	с остатками пищи	0,5	60	90	90	90	погружение
Посуда лабораторная		0,5	60	60	60	90	погружение
		1,0	10	10	30	45	

Продолжение таблицы 6

Объект обеззараживания		Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин				Способ обеззараживания
			Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза)	кандидоз	Вирусные инфекции	Туберкулез, дерматофитии	
Игрушки		0,1 0,5	60 15	- 60	- 30	- 90	погружение
Резиновые коврики, банные сандалии из пластмасс и резины		0,5	60	60	60	90	замачивание
белье	не загрязненное выделениями	1,0	30	30	30	45	замачивание
	загрязненное выделениями	3,0	60	60	60	60	замачивание
Уборочный инвентарь		1,0	30	30	30	45	погружение
Медицинские отходы		4,0	15	15	15	15	погружение
Жидкие выделения		1:3	180	180	180	180	
Спороцидный режим дезинфекции: 10% - 45 мин							

3.5.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), предметы обстановки, поверхности аппаратов, приборов протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 50 мл средства на 1 м² поверхности, или орошают раствором с помощью гидропульты, автомакса, распылителя «Квазар» из расчета 150 мл средства на 1 м² поверхности (табл. 6). Избыток дезинфицирующего средства после применения способом орошения удаляют сухой ветошью.

3.5.3. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и пр.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша, по окончании дезинфекции его промывают водой (табл. 6). Норма расхода раствора средства при однократной обработке поверхностей способом протираания составляет 100 мл/м² поверхности. При обработке санитарно-технического оборудования способом орошения норма расхода рабочего раствора средства составляет 150 мл/м² поверхности (при использовании гидропульты, автомакса, распылителя «Квазар») при использовании на одну обработку.

3.5.4. Посуду столовую и лабораторную полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на комплект посуды (табл. 6). Если на столовой посуде имеются остатки пищи, их перед дезинфекцией предварительно удаляют. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3-х минут.

3.5.5. Белье замачивают в растворе средства (табл. 6). Норма расхода раствора средства - 4 л/кг сухого белья, при туберкулезе, дерматофитиях - 5 л на 1 кг белья. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.5.6. Предметы ухода за больными и игрушки полностью погружают в дезинфицирующий раствор в емкость с крышкой (табл. 6). По окончании дезинфекции их промывают водой в течение 3 минут.

3.5.7. Уборочный материал (ветошь) замачивают в растворе средства и по окончании дезинфекции прополаскивают (табл. 6).

3.5.8. Обувь из пластмасс и резин погружают в раствор средства, по окончании дезинфекции их промывают проточной водой и высушивают (табл. 6). Резиновые коврики замачивают, а деревянные решетки обеззараживают способами протираания или орошения.

3.5.9. Обувь из натуральной кожи дважды протирают изнутри тампоном, обильно смоченным дезинфицирующим раствором. По истечении экспозиции обработанную поверхность протирают водой и высушивают (табл. 6).

3.5.10. Медицинские отходы (изделия медицинского назначения однократного применения

перевязочные средства, одноразовое постельное и нательное белье, одежда персонала и др.) обеззараживают по режимам табл. 6, погружая их в избыток раствора, с последующей их утилизацией.

3.5.11 Жидких выделения: мочу, фекалии, кровь, сыворотку и другие биологические жидкости обеззараживают в пластмассовых, эмалированных или стеклянных емкостях путем добавления концентрированного раствора «Глютар» в соотношении 1 ч средства к 3 ч. выделений, через 180 мин выделения утилизируют. Поверхность на которой находились выделения, протирают 4% раствором средства «Глютар».

3.5.12. Генеральные уборки проводятся по режимам, приведенным в табл. 7.

Таблица 7. Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок растворами средства «Глютар»

Профиль учреждения	Концентрация раствора по препарату, %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Соматические, хирургические, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории	0,25 0,5	60 30	Протирание, орошение
Противотуберкулезные организации здравоохранения	0,5 1,0	90 45	Протирание, орошение
Кожно-венерологические организации здравоохранения	0,5	60	Протирание, орошение
Инфекционные организации здравоохранения	По режиму соотв.инфекции		Протирание, орошение

3.5.13. На коммунальных, спортивных, культурных, бытовых, административных объектах, предприятиях общественного питания, сельского хозяйства и торговли, в детских и образовательных учреждениях, транспортных средствах, общественных туалетах (биотуалетах) и мусороуборочном оборудовании дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции при бактериальных инфекциях, кроме туберкулёза (таблица 6).

3.5.14. В банях, саунах, бассейнах, парикмахерских и других предприятиях сферы обслуживания дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции при дерматофитиях (таблица 6).

3.5.15. Дезинфекцию технологического оборудования промышленных предприятий проводят промывкой дезинфицирующим раствором оборудования в замкнутом пространстве или способом протирания ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 50 мл/м², выдерживают экспозицию в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции при бактериальных инфекциях, кроме туберкулёза (таблица 6). После дезинфекции технологическое оборудование несколько раз промывают водопроводной водой.

3.6. Применение для дезинфекции поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности и торговли.

3.6.1. На предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли, транспортных средствах для перевозки продуктов питания дезинфекцию проводят согласно с действующими Инструкциями и Санитарными нормами и правилами, по режимам, рекомендованным для дезинфекции при бактериальных инфекциях, кроме туберкулёза (таблица 6 и 8).

Таблица 8. Режимы дезинфекции на предприятиях пищевой промышленности растворами средства «Глютар»

Объект дезинфекции	Концентрация раствора по препарату, %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткая мебель, поверхности аппаратов, приборов	0,1 0,5	60 15	Протирание ветошью, орошение с помощью гидропульта.
Санитарно-техническое оборудование	0,1 0,5	60 15	Протирание, орошение.
Уборочный инвентарь	1,0	60	Погружение в емкость с дезинфектантом
Оборудование и аппараты, емкости (котлы, цистерны, баки и др.), трубопроводы	0,1 0,5	60 15	Протирание ветошью, орошение с помощью гидропульта, заполнение, рециркуляция
Детали оборудования, машин, установок, инвентарь, посуда, тара	0,1 0,5	60 15	Погружение в емкость с дезинфектантом, заполнение, орошение, протирание
Резиновые коврики	0,5	60	Протирание, орошение, замачивание
Транспортные средства	0,1 0,5	60 15	Протирание ветошью, орошение с помощью гидропульта.

3.6.2. Дезинфекцию растворами средства «Глютар» проводят после тщательной мойки разрешенными к применению средствами и ополаскивания.

На поверхностях без видимых загрязнений растворы препарата применяются, как моюще-дезинфицирующее средство.

3.6.3 Поверхности в производственных, бытовых, санитарно-технических помещениях (пол, стены и др.), предметы обстановки, тару, поверхности аппаратов и приборов протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 50 мл средства на 1 м² поверхности, или орошают раствором с помощью гидропульта, автомакса, распылителя типа «Квазар» из расчета 150 мл средства на 1 м² поверхности.

3.6.4. Дезинфекцию технологического оборудования, трубопроводов, продуктопроводов, шлангов и т.д. проводят промывкой дезинфицирующим раствором в замкнутом пространстве (заполнение, рециркуляция). После окончания дезинфекции все несколько раз промывают водопроводной водой.

3.6.5. Для дезинфекции съемные детали машин, инвентарь, мелкую тару, посуду и т.д. очищают от загрязнений и полностью погружают в дезинфицирующий раствор. После окончания дезинфекции остатки дезсредства смывают водой в течение 3-х минут. Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции при бактериальных инфекциях, кроме туберкулёза (таблица 6).

3.6.6 Контроль остаточных количеств дезсредства после смывания проводят по методике, описанной в п. 8 настоящей инструкции.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18-ти лет, а также лица, имеющие противопоказания согласно «Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих» утвержденной постановления Минздрава РБ № 47 от 28.04.2010г.

4.2. При приготовлении рабочих растворов избегать попадания концентрата в глаза и на кожу.

4.3. Емкости с дезинфицирующим раствором для обработки изделий медицинского назначения должны быть закрыты.

4.4. Все работы со средством «Глютар» проводить в резиновых перчатках. После работы с препаратом тщательно вымыть руки.

4.5. Хранить в местах, недоступных детям, отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов

4.6. При работе с препаратом специальных средств защиты органов дыхания не требуется. Дезинфекция поверхностей помещений способом протирания должна проводиться в отсутствии пациентов, детей и других посторонних лиц. После проведения дезинфекции поверхностей в помещениях должно проводиться их проветривание.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. Средство «Глютар» мало опасно, но при неосторожном приготовлении его растворов, при несоблюдении мер предосторожности возможны случаи отравления, которые выражаются в явлениях раздражения глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия, отечность).

5.2. В случае попадания препарата на кожу следует смыть струей проточной воды с мылом.

5.3. В случае попадания препарата в глаза их следует промыть большим количеством воды, закапать 30%-ный раствор сульфацила натрия и обратиться к врачу.

5.4. В случае попадания препарата в желудок необходимо выпить большое количество воды, не вызывая рвоту, и обратиться при необходимости к врачу, предъявив этикетку.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Средство «Глютар» можно перевозить всеми видами транспорта.

6.2 Транспортировку и хранение средства осуществляют в соответствии с действующими НД.

6.3 Средство следует хранить отдельно от лекарственных средств, в местах, недоступным детям, в плотно закрытой упаковке фирмы-изготовителя.